

SIEMENS



www.siemens.de/micon

Das neue Klangkonzept.

Vorhang auf für micon™ – die neue Plattform hinter der BestSound™ Technology.
Für außerordentlich natürliche Klangqualität.



Life sounds brilliant.



micon.

Eine neue Hörerfahrung.

Ob der sanfte Hauch des Windes oder ein liebevolles Kompliment – unsere Lebensqualität steigt, wenn wir die Klänge um uns herum in ihrer ganzen Vielfalt wahrnehmen können. Genau hierfür wurde micon™ entwickelt – die neue Plattform hinter der Siemens BestSound™ Technology. Sie verbindet zukunftsweisende Funktionen mit innovativer Technologie und hoher Prozessorgeschwindigkeit. Der Klangkomfort ist dabei so natürlich, dass Ihre Kunden beinahe vergessen werden, dass sie Hörsysteme tragen.



Soundability.

In einer neuen Dimension.

micon wurde konzipiert, um für die harmonische Balance zwischen Klangqualität (**Sound Quality**) und Sprachverständlichkeit (**Audibility**) zu sorgen – eine Fähigkeit, die wir **Soundability™** genannt haben. Durch die hohe Frequenzauflösung in 48 Kanälen, mehr Leistungsstärke und einem großen Frequenzbereich hebt die neue micon-Technologie Soundability auf ein völlig neues Level.





miSound.

Natürliche Klangerlebnisse.

Für herausragende Klangqualität: Um auf akustische Details individuell eingehen zu können, verfügt micon über einen neuen Anpass-Algorithmus. Dieser nutzt die spezielle micon-Technologie mit adaptiven Regelzeiten. micon trägt dazu bei, die akustische Welt an die eingeschränkte Hördynamik des Trägers anzupassen, um eine möglichst natürliche Klangqualität zu erreichen.

Dank der hohen Prozessorgeschwindigkeit und dem optimierten Rückkopplungsmanager sorgt micon für nahezu brillanten Klang. Durch die ununterbrochene Messung der kritischen Verstärkung, die Fingerprint-Technologie, Frequenz-Shifting sowie die nun parallele, unabhängige Messung und gegenphasige Rückkopplungsauslöschung für jedes Mikrofon, bietet micon eine deutlich bessere Rückkopplungserkennung und -stabilität.

miFocus.

Intelligentes Sprachverstehen.

Ein Gespräch in einem Raum mit vielen Menschen zu verfolgen oder die Richtungen verschiedener Geräuschquellen im Berufsverkehr zu differenzieren, erfordert eine exakte Ortung der Geräusche. Das neue 48-kanalige adaptive TwinMic System™ übernimmt das Filtern von Störgeräuschen. So kann der Träger sich auf das konzentrieren, was er hört und nicht, wie er es hört.

Mit seinem innovativen Algorithmus zur direktionalen Sprachanhebung nutzt micon die Vorteile von Richtmikrofonen und speziellen digitalen Filtern, um das Hören auch unter schwierigen Bedingungen zu erleichtern. Zusätzlich ermöglicht die direktionale Sprachanhebung die Dämpfung verschiedenster Hintergrundgeräusche, ja sogar von Sprache – selbst wenn sich die Sprachquellen bewegen.





miGuide.

Individuell angepasste Sprachverständlichkeit.

Ob in einer vielbesuchten Bar oder beim romantischen Abendessen zu zweit – das gesunde Gehör passt sich dem Geräuschpegel der Umgebung an. Und genauso reagiert auch micon. Dank intelligenter Situationserkennung erkennt es bestimmte akustische Situationen und passt die Verstärkungskurven und die adaptiven Parameter so an, dass der Träger von einem möglichst brillanten Hörerlebnis profitieren kann.

micon verfügt außerdem über einen fortschrittlichen Lern-Algorithmus, der es möglich macht, die Systeme auf viele unterschiedliche Hörsituationen zu ‚trainieren‘ – durch den Kunden oder den Hörgeräteakustiker. Zudem kann eine gleitende, automatische Anpassung der Verstärkung individuell und innerhalb eines gewählten Zeitraumes ohne Beeinträchtigung der Lautstärkewahrnehmung oder des Hörkomforts für den Kunden erfolgen.

Das neue Klangkonzept. Lernen Sie die micon

Ace micon

Das neue Ace micon™ ist das kleinste und diskreteste RIC-Hörsystem von Siemens. Ausgestattet mit micon BestSound Technology bietet es unauffällige und zuverlässige Funktionalität mit möglichst natürlichem Klangkomfort. Trotz seiner kleinen Bauform ist Ace für erstaunlich viele Hörverluste geeignet und ermöglicht auf Wunsch auch eine manuelle Programmauswahl – die ideale Lösung für eine Erstversorgung.

Pure micon

Pure micon™ bietet herausragende Klangqualität in besonders unauffälligem Design. Das kleinste komplett ausgestattete RIC von Siemens vereint alle wichtigen Leistungsmerkmale in einem ausgesprochen kleinen Gehäuse. Seine neue Bauweise macht Pure besonders robust und zuverlässig. Es ist für fast jeden Grad von Hörverlusten geeignet. Für Personen mit einem aktiven Lebensstil.

Siemens Life micon

Erfüllt hohe Ansprüche an Optik und Funktionalität: Das elegante Siemens Life micon™ bietet herausragenden Klangkomfort von Anfang an. Als kleinstes Standard-HdO-Hörsystem im Sortiment ist es die Alternative, wenn ein RIC-Hörsystem nicht in Frage kommt. Dank der flexiblen LifeTubes passt Siemens Life vom ersten Augenblick an nahezu jedem Kunden.

Aquaris micon

Duschen, Gärtnern, Mountainbiken oder ein Spaziergang im Regen – Aquaris micon™ ist die Lösung für alle, die das Leben unbeschwert genießen möchten. Wasser- und staubdicht (IP68) können weder Schweiß, Staub, Schmutz noch Sand in das robuste Hörsystem eindringen. Jetzt noch leistungsfähiger mit bis zu 65 dB Verstärkung und der neuen micon-Technologie.

Ace micon



-Produkte kennen.

Pure micon



Siemens
Life micon



Aquaris micon




Ace micon.

Das kleine Wunder,
das sein Geheimnis für
sich behält.





Ace micon auf einen Blick

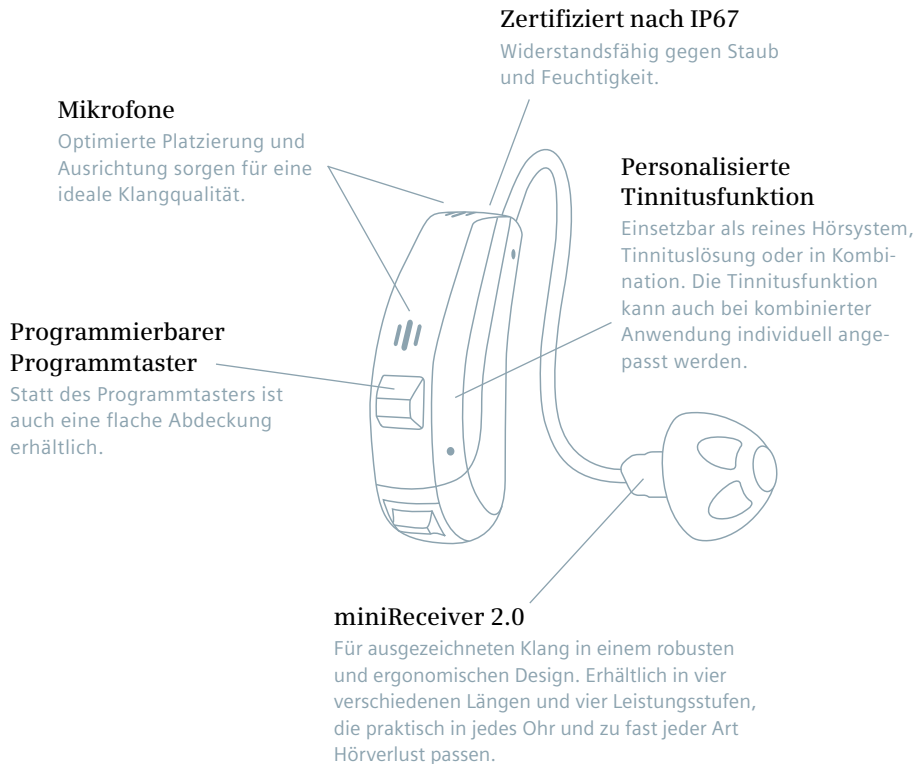

- Ergonomisches Design
- Einfacher Gehäusewechsel
- Ein-/Ausschalter am Batteriefach
- Batteriegroße 10
- Matrix:
 - miniReceiver 2.0 S: 108 / 45 dB
 - miniReceiver 2.0 M: 114 / 55 dB
 - miniReceiver 2.0 P: 119 / 60 dB
 - miniReceiver 2.0 HP: 124 / 65 dB
- Erhältlich in zwei Leistungsklassen:

7mi

5mi

Pure micon.

Der leistungsstarke
Begleiter für
mühelose Interaktion.





Pure micon auf einen Blick

Mikrofone

Optimierte Platzierung und Ausrichtung sorgen für eine ideale Klangqualität.

Verbesserte Tinnitusfunktion

Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

Programmierbare und auswechselbare Bedienelemente

Die Bedienelemente können programmiert und/oder ausgetauscht werden und passen sich den Ansprüchen des Benutzers an.

Zertifiziert nach IP67

Widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.

Austauschbares Gehäuse

Das Gehäuse kann schnell und einfach ausgewechselt werden, wenn sich die Farbwünsche des Kunden ändern.

miniReceiver 2.0

Für ausgezeichneten Klang in einem robusten und ergonomischen Design. Erhältlich in vier verschiedenen Längen und vier Leistungsstufen, die praktisch in jedes Ohr und zu fast jeder Art Hörverlust passen.

- Optimisiertes ergonomisches Design
- Eingebaute Telefonspule
- e2e wireless™ 2.0
- Optionaler Tinnitus-Noiser
- Ein-/Ausschalter am Batteriefach
- Batteriegröße 312
- Matrix:
 - miniReceiver 2.0 S: 108 / 45 dB
 - miniReceiver 2.0 M: 118 / 60 dB
 - miniReceiver 2.0 P: 124 / 70 dB
 - miniReceiver 2.0 HP: 130 / 75 dB
- Erhältlich in zwei Leistungsklassen:

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
7mi

5mi

Siemens Life micon.

Das kompakte Kunstwerk
für Hören im großen Stil .





Siemens Life micon auf einen Blick

Drucktaster

Ein programmierbarer Drucktaster dient zur Auswahl verschiedener Programme und sogar als Lautstärkeregler.

Verbesserte Tinnitusfunktion

Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

Austauschbares Gehäuse

Das Gehäuse kann schnell und einfach ausgewechselt werden, wenn sich die Farbwünsche des Kunden ändern.

Lamellen-Tip

Halboffene Passform, die sich an viele unterschiedliche Hörkanalformen anpasst.



- Programmierbarer Drucktaster
- e2e wireless™ 2.0
- Eingebaute Telefonspule
- Ein-/Ausschalter am Batteriefach
- Batteriegröße 312
- Matrix:
 - LifeTube 121 / 47 dB
 - Tragehaken 123 / 57 dB
- Erhältlich in zwei Leistungsklassen:

7mi

5mi

Aquaris micon.

Der robuste Partner,
der Klangwelten öffnet, die Elemente
aber ausschließt.





Aquaris micon auf einen Blick

Mikrofonabdeckung (nicht abnehmbar)

Schützt die Mikrofonmembranen und reduziert gleichzeitig störende Geräusche wie Wind, Regentropfen und Haarrascheln.

Verbessertes Batteriefach

Das mit Silikon versiegelte Batteriefach wurde überarbeitet und wesentlich verbessert.

Verbesserte, wasserdichte Luftaustauschmembran

Die neue, größere Membran sorgt für noch besseren Luftfluss zur Batterie. Ihre Oberfläche ist darauf ausgelegt, Wasser zuverlässig abzuweisen.

Hörerschutz


Eine wasserundurchlässige Dichtung in der Gehäuseöffnung und ein nanobeschichtetes Gitter schützen zusätzlich vor Wassereintritt.

Lamellen-Tip

Halboffene Passform, die sich an viele unterschiedliche Hörkanalformen anpasst.

Flaschengehäuse

Das austauschbare Gehäuse ist aus einem Stück gefertigt. Zusätzliche Silikonringe dichten das Batteriefach zum Gehäuse ab.

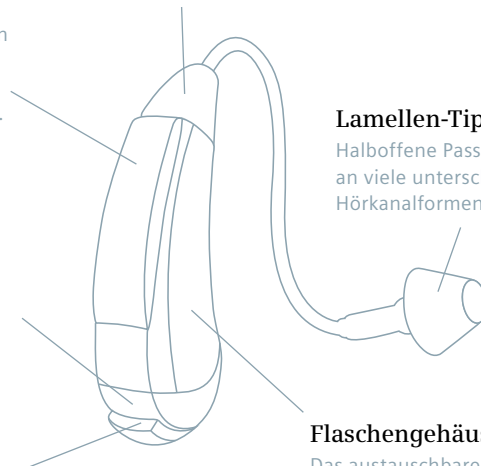

- Robuste Konstruktion
- Schutzart IP68
- Wasser- und staubdicht
- Gehäusebeschichtung mit Anti-Rutsch-Kunststoff
- e2e wireless™ 2.0
- Eingebaute Telefonspule
- Optionaler Tinnitus-Noiser
- Ein-/Ausschalter am Batteriefach
- Batteriegroße 13
- Matrix:
 - LifeTube 124 / 50 dB
 - Tragehaken 130 / 65 dB
- Erhältlich in zwei Leistungsklassen:

7mi

5mi

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen: Connexx 7.

Connexx™ von Siemens steht für einfache, schnelle und zuverlässige Hörsystemanpassung. Connexx 7 ähnelt in der Bedienbarkeit stark der vorherigen Version und lässt sich nahezu intuitiv anwenden. Die Programmier-Software für die neuen Siemens micon-Hörsysteme verbindet moderne Funktionalität mit einfacher Handhabung. Für einen noch schnelleren und einfacheren Arbeitsablauf.

Und das Beste: Die Software kann dem individuellen Anpassprozess entsprechend eingerichtet werden.



Die skalierbare .NET-basierte Benutzeroberfläche ermöglicht, die Aufteilung des Bildschirms Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.



Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Siemens AG geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und können ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Global Siemens Headquarters

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München

Global Siemens Healthcare Headquarters

Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestraße 127
91052 Erlangen
Tel.: +49 9131 84-0

www.siemens.com/healthcare

Hersteller

Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstraße 125
DE-91058 Erlangen

Kontakt

Deutschland/Österreich
Siemens Audiologische
Technik GmbH
Gebbertstraße 125
DE-91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 308-0

Schweiz
Siemens Audiologie AG
Soodstrasse 57
CH-8134 Adliswil
Tel.: +41 44 711 74 74

Geschäftsbereich

Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstraße 125
DE-91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 308-0

Bestell-Nr. A91SAT-01831-99C1-7600 | Gedruckt in Deutschland | © 10.2012 Siemens AG

www.siemens.de/hoersysteme / www.siemens.at/hoergeraete / www.siemens.ch/hoersysteme